



## INSTRUÇÕES DE USO

**Produtos:**

Fio de Algodão/Poliester Agulhado – Shalon

Fio de Sutura de Algodão / Poliester Sem Agulha Shalon

**Fabricado e distribuído por:**

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

**Versão:**

01



## **FIO DE ALGODÃO/POLIÉSTER AGULHADO – SHALON**

### **FIO DE SUTURA DE ALGODÃO / POLIÉSTER SEM AGULHA SHALON**

#### **DESCRIÇÃO**

Os fios cirúrgicos de **Algodão/Poliéster Agulhado e sem Agulha - Shalon** são de origem mista, formados por filamentos de poliéster e fibras longas de algodão. Compostos de algodão 30% e poliéster 70%, cujas fibras são multifilamentares, unidas e torcidas. Sofre um processo de enceramento e tratamento especial da superfície. Possui boa resistência e excelente manuseio. Reação tecidual moderada nos primeiros 7 dias, decrescendo gradativamente até seu processo de encapsulamento pelos tecidos. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno. Classe II.

#### **APRESENTAÇÃO**

Os fios cirúrgicos de **Algodão/Poliéster Agulhado e sem Agulha - Shalon** possuem coloração azul e são comercializados em caixas com 24 envelopes, sendo que cada envelope contém 1, 3 ou 15 de suturas agulhadas ou sem agulha, dependendo do item, no tamanho de 45 e 75 cm. As agulhas cirúrgicas apresentam diversos tamanhos e curvaturas. O diâmetro dos fios varia segundo os números cirúrgicos de 5-0 a 1. O produto possui prazo de validade de 5 anos a partir da data de esterilização.

#### **INDICAÇÕES**

Os fios cirúrgicos de **Algodão/Poliéster Agulhado e sem Agulha - Shalon** são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos odontológicos e gastrointestinais.



## **CONTRAINDICAÇÕES**

Os fios cirúrgicos de **Algodão/Poliéster Agulhado e sem Agulha - Shalon** são contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.

## **INTRUÇÕES DE USO**

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

## **CUIDADOS**

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;
- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.



## **CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;
- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

## **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR**

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP. 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410016 (Algodão/Poliéster Agulhado); 10243410032 (Algodão/Poliéster sem Agulha).

## **VENDAS**

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br