



INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Kit Catarata Shalon

Fabricado e distribuído por:

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

Versão:

00



KIT CATARATA SHALON

DESCRIÇÃO – FIO DE NYLON

Os fios cirúrgicos de **Nylon** são de origem sintética, fabricados a partir da extrusão de poliamida 6 (PA 6.6). É um material biologicamente compatível, bem tolerado pelo organismo, monofilamentar, de alta resistência e fácil manuseio. A hidrólise progressiva pode resultar em perda gradual da força tênsil “in vivo”. Reação tecidual inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno ou Cobalto.

DESCRIÇÃO – FIO DE SEDA

Os fios cirúrgicos de **Seda** são de origem animal, obtidos a partir de fibras produzidas pelo bicho-da-seda. As fibras são trançadas e siliconizadas, resultando em suturas multifilamentares, de alta resistência e excelente manuseio, com passagem suave pelos tecidos. A degradação progressiva da fibra pode resultar em perda gradual da força tênsil “in vivo” e reação tecidual inflamatória moderada. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno.

APRESENTAÇÃO

O Kit Catarata é comercializado em caixas contendo 12 kit's, sendo que cada kit contém:

- 1 fio de Nylon 10-0, 18 cm, e agulha TP. Esp. 0,65 cm e 1 fio de Seda 4-0, 45 cm, e agulha CTI 1,3 cm; ou
- 1 fio de Nylon 10-0, 36 cm, e agulha 2 x TP. Esp. 0,65 cm e 1 fio de Seda 4-0 45 cm e agulha CTI 1,3 cm.

Os fios de Seda e Nylon possuem coloração preta. O produto possui prazo de validade de 5 anos a partir da data de esterilização. Classe II.



INDICAÇÕES

- Os fios cirúrgicos de Nylon são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos ginecológicos, obstétricos, oftalmológicos, vasculares e cuticulares;
- Os fios de Seda são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos odontológicos, oftalmológicos, aparelho digestivo, cuticular e plástica.

CONTRAINDICAÇÕES

São contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.

INSTRUÇÕES DE USO

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

CUIDADOS

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;



- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;
- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP. 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410042

VENDAS

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br