



INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Kit Cesárea com Catgut Shalon

Fabricado e distribuído por:

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

Versão:

00



KIT CESÁREA COM CATGUT SHALON

DESCRIÇÃO – FIO DE NYLON

Os fios cirúrgicos de **Nylon** são de origem sintética, fabricados a partir da extrusão de poliamida 6 (PA 6.6). É um material biologicamente compatível, bem tolerado pelo organismo, monofilamentar, de alta resistência e fácil manuseio. A hidrólise progressiva pode resultar em perda gradual da força tênsil “in vivo”. Reação tecidual inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno ou Cobalto.

DESCRIÇÃO – FIO DE CATGUT SIMPLES

Os fios cirúrgicos de **Catgut Simples** são de origem animal, composto de colágeno, derivado da serosa proveniente do intestino de gado bovino. Fio de aspecto homogêneo e multifilamentar torcido. Possui alta resistência e fácil manuseio. Retenção da força tênsil “in vivo” aproximadamente 7-10 dias. O período de absorção é de aproximadamente 30 dias, sendo absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. Reação tecidual moderada. Esterilizado por Cobalto.

DESCRIÇÃO – FIO DE CATGUT CROMADO

Os fios cirúrgicos de **Catgut Cromado** são de origem animal, composto de colágeno, derivado da serosa proveniente do intestino de gado bovino, tratados com sais de cromo. Fio de aspecto homogêneo e multifilamentar torcido. Absorção prolongada devido ao tratamento especial com sais de cromo. Possui alta resistência e fácil manuseio. Retenção da força tênsil “in vivo” aproximadamente 21-28 dias. O período de absorção é de aproximadamente 60 dias, sendo absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. Reação tecidual moderada. Esterilizado por Cobalto.



APRESENTAÇÃO

O Kit Cesárea com Catgut é comercializado em caixas com 12 kit's, sendo que cada kit contém 1 fio de Nylon 4-0 de 75cm, 3 fios de Catgut Simples 2-0 de 90cm e 2 fios de Catgut Cromado 0 de 90cm. O produto possui prazo de validade de 3 anos a partir da data de esterilização. Classe IV.

INDICAÇÕES

O Kit Cesárea com Catgut é indicado para ligações e/ou aproximações em tecidos lisos em geral, incluindo procedimentos utilizados em cesariana, aplicando-se nas bordas das incisões cirúrgicas, utilizando as técnicas segundo critério médico.

CONTRAINDICAÇÕES

São contraindicados em cirurgias cardiovasculares e neurológicas.

INTRUÇÕES DE USO

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

CUIDADOS

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;



- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;
- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;
- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP. 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410037



VENDAS

Av. C-255 N° 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br