



INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Poliglecaprone 25

Fabricado e distribuído por:

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

Versão:

01



POLIGLECAPRONE 25

DESCRIÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Poliglecaprone 25** é um monofilamento sintético absorvível esterilizado, composto por um copolímero PGA-PCL, formado pela polimerização de dois monômeros: Glicolida 75% e Caprolactone 25%. O fio não apresenta propriedades antigênicas ou pirogênicas, de modo que a absorção é acompanhada apenas por uma reação mínima dos tecidos. Esterilizado por Óxido de Etileno. Classe IV.

APRESENTAÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Poliglecaprone 25** possuem coloração violeta ou incolor e são comercializados em caixas com 24 envelopes, sendo que, cada envelope contém 1 fio de sutura agulhada no tamanho de 70 ou 90 cm. As agulhas cirúrgicas apresentam diversos tamanhos e curvaturas. O diâmetro dos fios variam segundo os números cirúrgicos de 5-0 a 1. O produto possui prazo de validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

INDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Poliglecaprone 25** são indicados na coaptação e/ou laqueação dos tecidos moles em geral, sempre que forem indicados fios absorvíveis.

CONTRAINDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Poliglecaprone 25** violeta ou incolor pelo fato de ser absorvíveis, não devem ser utilizados nos casos em que é necessária uma coaptação prolongada de estruturas sob tensão. Também é contra indicado para o uso em tecidos cardiovasculares e neurológicos, e para uso em cirurgia oftálmica. O **Poliglecaprone 25 Incolor** não deve ser utilizado em casos de fechamento abdominal ou de tecidos da fáscia.



INTRUÇÕES DE USO

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;
- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;



- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP: 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410034

VENDAS

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br